

## FAQ-Liste für Hand-Bike-ELD Para

Problem		Lösungen
<b>Anbauständer</b>	klappbar	Nicht erforderlich, Ständer so einstellen, das sie neben den Vorderrädern stehen.
<b>Automatikeinraster</b>	für was sind sie da	Zum hochheben der kleinen Rollstuhlvorderräder
<b>Batterien</b>	neue Batterien haben keine volle Kapazität	Volle Kapazität wird nach 3 mal entladen und laden erreicht
<b>E Fix Antrieb</b>		Beim fahren mit dem Hand Bike dürfen 9 Km/h nicht überschritten werden, auch bei aus geschalteten Motoren. Die Elektronik wird sonst durch den Dynamoeffekt zerstört
<b>Hand Bike ankoppeln</b>	ohne Hilfe möglich	In 10 Sekunden von geübten Bikern, Tetras ist es auch selbstständig möglich
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	Schneller als 6 km/h	15 Km/h möglich, neuer Motor, kein Rückwärtsgang mehr, Freilauf
<b>GRV</b>	federt zu wenig ein	Bei noch größerem Einfederungsweg stellen sich die Rolliräder beim kurbeln V-förmig in Fahrtrichtung auf und bremsen das Gespann tierisch ab.
	*	
<b>GRV</b>	Achse ein kürz bar?	Ja, das Achsrohr kann gekürzt werden
<b>Licht</b>	brennt nicht	Sicherung im Bedienteil nachsehen oder Birne auswechseln
<b>Motor</b>	Motor bleibt während der Fahrt stehen	Überhitzungsschutz des Motor ist aktiviert. Nach ca. 5 Minuten kann die Fahrt fortgesetzt werden. Kontrollleuchte des An- Ausschalters ist aus. Oder: Der Motor musste bei längerer Bergabfahrt ständig mitbremsen, dann setzt wiederum der Überhitzungsschutz ein
	*	
<b>Positionsklemmen Fix</b>	was bewirken diese	Sie werden am Rollstuhl angebracht und gewährleisten die immer gleiche Anklempposition
<b>Reichweite</b>	Km Reichweite lässt nach	Akkus haben ihre Lebensdauer erreicht Bei ständiger Langsamfahrt werden Akkus stärker beansprucht und entladen schneller
<b>Rollstuhl Model</b>	extra Rollstuhl erforderlich	Nein; Stricker Hand Bikes sind an fast jeden Rollstuhl ohne Umbauten adaptierbar
<b>Schieberohre</b>	längere Schieberohre	Ab 1996 sind alle Schieberohre gleich (die mit dem Alu Gelenk) IN allen Hand Bikes können auch die 30 cm langen Schiebrohre vom Lomo 360 eingebaut werden.
<b>Schutzhelm</b>	ist das tragen vorgeschrieben	Nein, wie beim Fahrradfahrer empfohlen
<b>Tachometer</b>	keine Anzeige bzw nur Uhrzeit	-Keine Anzeige Batterie wechseln - Wenn nur Uhrzeit erscheint, wie folgt vorgehen: Tacho richtig auf den Halter stecken Magnetgeber und Sensor am Rad auf max. 1-3 mm Abstand einstellen Federschuhe am Halter (Gegenstück vom Tacho) auf richtigen Sitz prüfen wenn das nicht zum Erfolg führt, ist das Kabel defekt und es muss ein neuer Tacho angebaut werde.
<b>Umkippen</b>		Bei Kurvenfahrt mit dem Körper in die Kurve legen Umkippen des Hand Bikes nach hinten wegen des Bikes so gut wie ausgeschlossen
<b>Vorfürungen</b>	werden Hand Bikes Vorfürungen gemacht	Ja, näheres bitte in Bühl erfragen